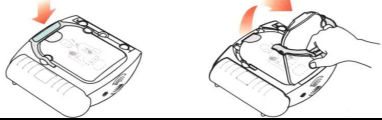
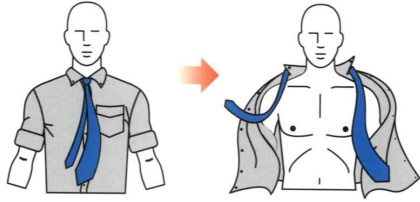

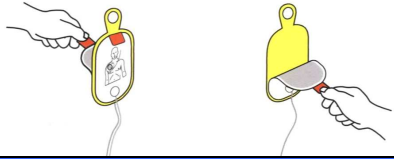
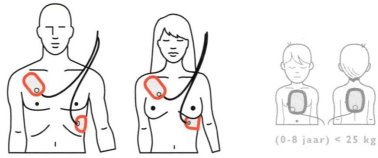


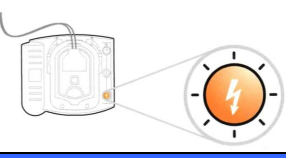



<p><b>1</b></p>	<p><b>GEDETAILLEERDE AANWIJZINGEN</b></p> <p>Te starten: Trek aan handvat. Verwijder deksel.</p> 	<p><b>Actie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer bewustzijn en ademhaling (max. 10 sec)</li> <li><b>Bel 112</b> en meldt dat het om reanimatie gaat.</li> <li>Plaats de AED naast het hoofd van het slachtoffer, aan de kant van de hulpverlener</li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p>Verwijder de kleding van de borst van de patiënt. Maak de huid schoon en droog deze zo nodig af.</p> 	<p><b>Ontbloot bovenlichaam:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij de AED zit een etui met daarin o.a.: een grote kledingschaar, een scheermes en een handdoek</li> <li>Ontbloot het bovenlichaam geheel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder BH en sieraden</li> <li>Raak piercings niet aan met de elektrode</li> <li>Scheer het borsthaar met het scheermes</li> <li>Droog de borst (verwijder achtergebleven haar) met handdoek</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Opmerking:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht niet op de stem als je weet wat je moet doen! Werk dan sneller, de AED volgt jou!</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p>Trek het beschermfolie los en neem de elektroden uit.</p> 	<p><b>Plaatsen elektroden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de beugel eraf.</li> <li>Trek de beschermfolie eraf en neem de elektroden uit.</li> <li>Trek de elektroden van de gele kunststof onderlaag.</li> </ul>
<p><b>4</b></p>	<p>Trek de elektroden van de gele kunststof onderlaag.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breng de elektroden aan precies zoals het plaatje aangeeft.</li> <li>Plak de elektroden in 1x goed. Niet erop en eraf ...</li> </ul> <p><b>Ondergrond.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vocht of metaal maakt niet uit zolang de elektroden geen water of ondergrond aanraken.</li> </ul> <p><b>Bijzondere omstandigheden;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwonding op plek elektroden: plak de elektroden andersom (rechtsboven &amp; linksonder) &amp; droog bloed zoveel mogelijk voor stroomstoot</li> <li>Pacemaker: de AED kan gewoon gebruikt worden (let op: indien de AED geen hart analyse kan maken de elektroden andersom plaatsen (rechtsboven &amp; linksonder)</li> <li>Zwanger: de AED kan gewoon gebruikt worden</li> <li>Kinderen onder de 25 kg (ongeveer 6 jaar): plaats 1 elektrode op de borst en de andere elektrode tussen de schouderbladen op de rug (zie tekening hiernaast)</li> </ul>
<p><b>5</b></p>	<p>Breng de elektroden precies zo aan als op de plaatjes.</p>  <p>(0-8 jaar) &lt; 25 kg</p>	
<p><b>6</b></p>	<p>Analyse in uitvoering ... Raak de patiënt niet aan!</p> <p>Wacht totdat  stopt met knipperen</p> 	<p><b>Tijdens de analyse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maak de omgeving van het lichaam vrij, zodat niemand de patiënt aanraakt</li> </ul>
<p><b>7</b></p>	<p>Om een shock toe te dienen: Druk op de knipperende <b>ORANJE</b> schocktoets. Raak de patiënt niet aan.</p> 	<p><b>Na de stroomstoot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laat de elektroden op het lichaam zitten. De AED controleert automatisch iedere twee minuten de hartfunctie</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 tot 4 schokken is normaal</li> </ul>
<p><b>8</b></p>	<p>Voor hulp bij reanimatie: Druk op knipperende <b>BLAUWE</b> knop.</p>  <p>voer 30 compressies uit • knijp neus dicht, kantel hoofd achterover • beadem tweemaal vol</p>	<p><b>Reanimeren:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Start <b>direct</b> na toedienen stroomstoot met reanimeren <b>nadat</b> de AED heeft gezegd: "het is veilig de patiënt aan te raken"</li> <li>Laat een andere hulpverlener op de blauwe knop drukken</li> </ul>